

Las recomendaciones a seguir según el material son las siguientes:

### Material desechable:



#### CONOS DE OTOSCOPIO

- Son de un solo uso.
- No deben ser reutilizados.

### Material que necesita limpieza:



#### ESFIGMOMANÓMETRO

- La parte textil debe lavarse con agua y detergente enzimático.
- El manómetro y las gomas se limpian cuidadosamente con un trapo humedecido con agua y detergente enzimático.

#### ▪ OTOSCOPIO

Se limpian con un trapo humedecido con

#### ▪ OFTALMOSCOPIO

agua y detergente enzimático y se secan.

### Material que necesita limpieza y desinfección de nivel medio:



#### ESTETOSCOPIO

- Se limpia con un trapo humedecido con agua y detergente enzimático (fundamentalmente la membrana y los auriculares) y se seca.
- Se desinfecta con alcohol de 70º la membrana de contacto.



#### TERMÓMETRO

- Se limpia con agua fría y detergente enzimático.
- Se desinfecta con alcohol de 70º.
- Se guarda limpio y seco.



#### PULSIOXÍMETRO

- Limpiar el aparato con detergente enzimático, aclarar con gasa humedecida en agua y secar por completo.
- Transductor: limpiar con detergente enzimático y secar; después desinfectar con gasa humedecida con alcohol de 70º